

## **INSTRUÇÕES DE USO**

## **FACA ENDOSCÓPICA**

**Antes de utilizar este dispositivo, leia com atenção este manual.**

**INSTRUÇÃO DE USO****FACA ENDOSCÓPICA****Nome Comercial: Faca Endoscópica****Nome técnico: Facas****Atenção: Produto estéril de uso único. Método de esterilização: óxido de etileno. PROIBIDO REPROCESSAR**











Este manual tem como objetivo fornecer instruções para utilização da Faca Endoscópica. Essas instruções são destinadas ao uso geral do dispositivo, variações na utilização podem ocorrer em procedimentos específicos devido à técnica individual e condições do paciente.





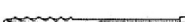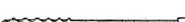

**DESCRIÇÃO**

As Facas Endoscópicas Russer foram especialmente projetadas para atender às necessidades dos profissionais da área médica com praticidade e segurança. Seus diferentes tamanhos permitem um manuseio simples e cômodo além de se adaptar a várias aplicações. As facas são confeccionadas com aço inoxidável de altíssima qualidade (metal grau cirúrgico) para garantir eficiência e durabilidade.

É um dispositivo que apresenta boa funcionalidade, bem como a rapidez e a segurança no procedimento a ser realizado.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Modelo</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	U-2410	Faca Endoscópica de SCHSE, reta, uma haste
	U-2410-2	Faca Endoscópica de SCHSE, reta, duas haste
	U-2420	Faca Endoscópica, forma de gancho, uma haste
	U-2420-2	Faca Endoscópica, forma de gancho, duas haste
	U-2430	Faca Endoscópica, redonda, uma haste
	U-2430-2	Faca Endoscópica, redonda, duas haste
	U-2440	Faca Endoscópica de LUDVIK, reta, com borda ondulada, uma haste
	U-2440-2	Faca Endoscópica de LUDVIK, reta, com borda ondulada, duas haste
	U-2450	Faca Endoscópica, forma de anel, uma haste
	U-2450-2	Faca Endoscópica, forma de anel, duas haste

Modelo	Código	Descrição
	U-2460	Faca Endoscópica para enucleação fria, uma haste
	U-2460-2	Faca Endoscópica para enucleação fria, duas haste
	U-2470	Faca Endoscópica reta para ureteroscopia 3 Fr / 60 cm
	U-2471	Faca Endoscópica gancho para ureteroscopia 3 Fr / 60 cm
	U-2472	Faca Endoscópica gancho para nefroscopia 5 Fr / 35 cm
	U-2473	Faca Endoscópica gancho para nefroscopia 5 Fr / 45 cm

**EMBALAGEM**

O material se apresenta embalado em papel tubular de grau cirúrgico ou Tyvek®, acondicionado em uma caixa de papelão.

- 01 Faca Endoscópica
- 01 Instrução de Uso

**COMPOSIÇÃO**

- Aço Inox ABNT NBR 13911:2013

**INDICAÇÕES DE USO**

A Faca Endoscópica foi desenvolvida para auxiliar o profissional médico em procedimentos cirúrgicos invasivos, devendo ser necessariamente conduzido por profissional habilitado, com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental. Seus diferentes formatos permitem um manuseio simples e cômodo.

**CONTRA-INDICAÇÕES**

Não apresentado até o momento.

**ADVERTÊNCIA**

- A Russer não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, reprocessados ou re-esterilizados, já que a realização dos mesmos pode comprometer a integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo.
- Este dispositivo é fornecido estéril e de uso único.
- O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. - Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados.
- A aplicação de força excessiva poderá danificar o dispositivo.

**ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE**

- Os instrumentais devem ser mantidos em temperatura ambiente, em local limpo e seco, isento de umidade e de substâncias contaminantes.
- Evitar quedas ou batidas para evitar danos ao produto.
- Empilhamento recomendado: 05 caixas.
- Transportar o material com cuidado e evite choques mecânicos mesmo que leves.
- Transportar protegido de calor excessivo e umidade dentro da caixa embalada pelo fabricante.
- Como todo material médico deve-se observar as boas praticas de armazenamento e distribuição para o manuseio do mesmo.

**INSTRUÇÕES DE USO**

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao cirurgião a escolha final do método e dos materiais a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia. O material Faca Endoscópica é indicado para uso somente por profissional médico habilitado.

**DESCARTE:** Depois do uso, o produto não pode ser reutilizado, deve ser descartado conforme as normas hospitalares para produtos potencialmente perigosos. O manuseio e sua eliminação devem estar de acordo com os procedimentos médicos reconhecidos e de acordo com as normas e diretivas legais em vigor e conforme as normas hospitalares para produtos potencialmente perigosos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Todos os produtos descritos acima são esterilizados por Óxido de Etileno, de acordo com as normas ISO 11135 – Esterilização de Produtos para Saúde.

**PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO. ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. Não reesterilizar, reprocessar ou reutilizar.**

**ATENDIMENTO AO CLIENTE:** Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso Atendimento ao Cliente (0800 17 0007).

**Fabricado e Distribuído por:** Russer Brasil Ltda – Rua Antonia Martins Luiz, 589 – Distrito Industrial João Narezzi - Indaiatuba – SP – Tel: (19) 3825-9900 - Fax: (19) 3825-9905

**Responsável Legal:** Juan Ruben Calbucoy Oliarte

**Responsável Técnico:** Carlos Roberto Weffort - CREA-SP 060155940-1

**Registro ANVISA nº:** 803 297 200 24